

IHHT ATEMBEUTELSET

MEHR VOLUMEN FÜR ANGENEHMERES ATMEN

SET INHALT

Entnehmen Sie den Inhalt des ATEMBEUTELSETS und packen Sie alle enthaltenen Artikel aus.

Das Set besteht aus:

- 1x 3 L Atembeutel mit Schlaufe
- 1x Y - Stück beweglich
- 1x Adapter



ANSCHLUSS AM GERÄT

Verbinden Sie den Atembeutel und den Atemschlauch mit den äußeren Anschlüssen des Y-Stücks. Anschließend verbinden Sie den Adapter mit dem festen mittleren Teil des Y-Stücks und stecken ihn an den Luftauslass des Gerätes.



FIXIEREN DES ATEMBEUTELS

Drehen Sie das Gelenk des Y-Stücks nach oben und fixieren Sie den Atembeutel mit der Schlaufe in einer der mittleren Aussparungen der Schlauchhalterung des Gerätes. Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse fest mit dem Y-Stück und dem Gerät verbunden sind.

